

# L'utilisation sécuritaire des fauteuils élévateurs d'hygiène



Christiane Gambin  
asstsas

À la suite d'une utilisation déficiente du fauteuil élévateur de soins d'hygiène *Alenti*, la compagnie Arjo a émis un avis de sécurité et un guide d'utilisation et de formation. Voici les points importants pour une utilisation sécuritaire du modèle *Alenti* et des autres fauteuils de ce type.

Les fauteuils élévateurs sont conçus à l'intention des clients partiellement autonomes. Avec ce fauteuil, le client est transporté de sa chambre à la salle de bain. Le fauteuil soulève le client au-dessus du bain, l'installe au fond et facilite aussi la toilette. Arjo, le fabricant du modèle *Alenti*, donne certaines règles de sécurité.

## BIEN ÉVALUER LES CLIENTS

Avant toute utilisation du fauteuil, il est recommandé de s'assurer que le client réponde aux critères suivants :


- > le client a un bon tonus au niveau du tronc et garde son équilibre lorsqu'il est assis, dos droit, sans soutien ni assistance ;
- > il a un poids inférieur ou égal à 160 kg (350 lb) ;
- > il comprend les directives et s'y conforme.

Avec un client agressif ou qui ne respecte pas les consignes, il est conseillé de ne pas utiliser le fauteuil *Alenti*. Une évaluation continue du client est toujours nécessaire avant le transfert ou le bain. De plus, pendant le bain, le client ne doit pas être laissé sans surveillance.

## UTILISER LES SANGLES DE SÉCURITÉ

Lors de certains incidents où le client a chuté du fauteuil, les sangles de sécurité n'étaient pas installées. Le fabricant émet les recommandations suivantes :

- > utiliser les sangles de sécurité en tout temps afin de maintenir la bonne position du client ;

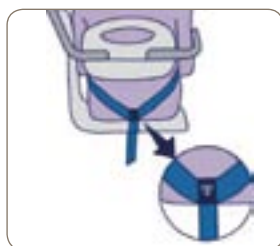

*Les sangles de sécurité doivent être installées en tout temps sur le client.*

- > vérifier les sangles avant chaque utilisation pour s'assurer qu'elles soient en bon état, non effilochées, déchirées ou autrement endommagées ;
- > suivre les directives du manuel d'utilisation et d'entretien de l'équipement pour bien attacher les sangles de sécurité.

## INSTALLER LE CLIENT DANS LE BAIN

Enfin, dans un souci de rendre l'utilisation de la chaise plus sécuritaire pour le client, il est suggéré de descendre la baignoire au plus bas niveau et de soulever le fauteuil d'hygiène suffisamment haut pour dégager le bord du bain.

Si vous possédez d'autres modèles de chaise d'hygiène, vérifiez avec votre fournisseur les règles de sécurité et d'utilisation qui sont préconisées ! ●

### POUR EN SAVOIR PLUS

Arjo Canada - Alain Gilbert, directeur des ventes  
Tél. : 1 800 665-4831, courriel : [agilbert@arjo.ca](mailto:agilbert@arjo.ca)  
Internet : [www.arjo.com](http://www.arjo.com)



*La chaise Alenti doit être utilisée conformément aux règles de sécurité émises par le fabricant.*



*Si le client ne peut tenir correctement dans le fauteuil élévateur, d'autres équipements (civière-douche, chaise de bain, etc.) peuvent être utilisés.*