INSTALLER LA TOILE DOUBLE CUISSARDE DU LÈVE-PERSONNE SOUS UNE CLIENTE COUCHÉE AU SOL

Équipement

Caractéristiques de la cliente : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs.



Avant d'utiliser le lève-personne, l'infirmière doit évaluer l'état de santé de la cliente. L'utilisation d'une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement.

Étape 1



INTERVENANTE 1

 Placer un oreiller sous la tête de la cliente, puis tourner la cliente sur le côté.

INTERVENANTE 2

- Installer la toile sur la cliente en utilisant des repères afin de la centrer.
- Insérer une partie de la toile sous la cliente.

Étape 2



INTERVENANTE 2

 Ramener la cliente sur le dos et la tourner légèrement vers soi.

INTERVENANTE 1

• Sortir la toile placée sous la cliente et l'étendre.

Étape 3



INTERVENANTE 2

• Ramener la cliente sur le dos, au centre de la toile.

Étape 4



INTERVENANTES 1 ET 2

 Croiser les petites sangles l'une dans l'autre, puis insérer chacune des grandes sangles extérieures dans la boucle de la petite sangle.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.